

EHP Desinfektionstücher

Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für kleine Flächen und Inventar in Arztpraxen, Heimen und Kliniken (z.B. Behandlungstühle, Hand- und Winkelstücke) und in der allgemeinen Praxis.

Produkteigenschaften:

- 120 Tücher verpackt in Siegelrandbeutel
- Tuchformat: 140 x 200mm, 23g/m²
- Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen
- Verpackungseinheit: 12 Stück
- Hergestellt in Deutschland

Anwendung:

Beutel oben aufschneiden und in die Dose stecken (Tücher im Beutel belassen). Das erste Tuch aus der Mitte der Rolle heraus und durch die Spenderöffnung des Deckels ziehen. Anschließend den Dosendeckel wieder aufsetzen. Deckel nach Tuchentnahme stets schließen.

Die Flächen dürfen anschließend während der Einwirkzeit nicht trockengerieben werden

Einwirkzeit:

Mikroorganismus:	Einwirkzeit:
Staphylococcus aureus	1 Minute
Escherichia coli	1 Minute
Enterococcus hirae	1 Minute
Pseudomonas aeruginosa	1 Minute
Candida albicans	1 Minute
Mycobacterium terrae	1 Minute
Aspergillus niger	1 Minute
BVDV	1 Minute
H1N1	15 sec

Aktive Substanzen:

100 g Flüssigkeit enthalten:

40,0 g Ethanol, 9,5 g n-Propanol, 2g Butanol
0,25g Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid
0,25g Alkylethylbenzyltrimethylammoniumchlorid
0,25g Didecyltrimethylammoniumchlorid

